


Suivez ces six étapes pour effectuer l'autotest de la COVID-19 à l'aide de la trousse de test d'antigène rapide Abbott PanbioMC.

Étape 1. Préparer le matériel

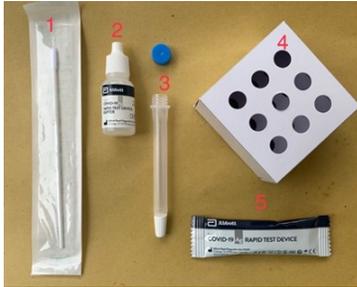

Laver les mains avant de commencer. Préparez la zone d'essai et disposez les fournitures dont vous aurez besoin sur une surface propre : 1. Échantillon nasal 2. Liquide tampon 3. Tube et bouchon 4. Support de tube 5. Dispositif d'essai

Étape 2: Placer le liquide tampon dans le tube




Placer le liquide tampon dans le tube jusqu'à la ligne comme indiqué, puis le placer dans le rack du tube.

Étape 3. Obtenir un tampon nasal



Sortir l'écouvillon nasal de l'emballage et l'insérer dans la partie molle du nez, à une profondeur d'environ 2cm. Tourner l'écouvillon 5 fois contre la paroi de la narine. Répéter en utilisant le même tampon dans l'autre narine.

Étape 4. Placer le tampon dans le tube

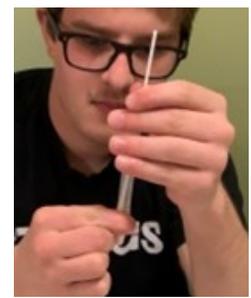

Placez le tampon dans le tube et faites-le pivoter dans le fluide 5 fois. Presser le tampon à travers le tube et le détacher (au point d'arrêt de la tige). Placer le capuchon bleu sur le tube et le replacer dans le porte-tube.

Étape 5. Appliquer le fluide sur le dispositif



Sortir le dispositif d'essai du paquet. Retirer le bouchon blanc du fond du tube et insérer 5 gouttes de liquide dans le puits de prélèvement du dispositif d'essai.

Étape 6. Lire le résultat du test



Commencez la minuterie pour 15 minutes. Lisez les résultats après 15 minutes et au plus tard 20 minutes. Une ligne rouge (C) - indique un résultat négatif, Deux lignes rouges (C et T) - indiquent un résultat positif. Une ligne (T) - est un test invalide (le test devra être refait).

Test positif? Si le résultat du test est positif (deux lignes rouges), veuillez appeler HealthLine 811 pour obtenir des directives sur le port du masque, l'isolement et prendre des dispositions pour recevoir un test de laboratoire de confirmation à un site de dépistage de la COVID-19.

Pour plus de renseignements consultez: [Saskatchewan.ca/covid19-testing](https://saskatchewan.ca/covid19-testing). Jetez toutes les fournitures d'essai usagées à la poubelle. Visionnez un exemple vidéo d'autotest à <https://youtu.be/2nKI31w9BPA>.